

Acceso a sus datos de MCG

La aplicación móvil Eversense y la plataforma web del Sistema de Gestión de Datos (DMS) Eversense están interconectadas, permitiendo la revisión de datos y la consulta de informes.
Si ya ha descargado la aplicación Eversense y la ha activado por correo electrónico, vaya al paso 3.

1 Creación de la cuenta de Eversense

- Descargue e instale la aplicación para móvil Eversense.

Descargue la *aplicación Eversense* gratuita desde la App Store de Apple o la Play Store de Google*.



- Después de aceptar el acuerdo de licencia, se le pedirá que cree y registre una cuenta con un correo electrónico y una contraseña.
- Cuando haya completado la pantalla, pulse la flecha al final de cada página para avanzar a la siguiente pantalla.

Pulse "Crear cuenta".



Haga clic en *Enviar*.


2 Activación de la cuenta de Eversense

Una vez haya enviado la información de su cuenta a través de la aplicación, recibirá un correo electrónico de Eversense con un enlace para completar el registro y activar la cuenta.



Se ha registrado para obtener una cuenta de Eversense. Para activar su cuenta, haga **clic aquí**.
 Gracias.
 El Equipo Eversense
www.eversensed diabetes.com

Importante: En un plazo de 72 horas, haga clic en el enlace en el correo electrónico para activar la cuenta.

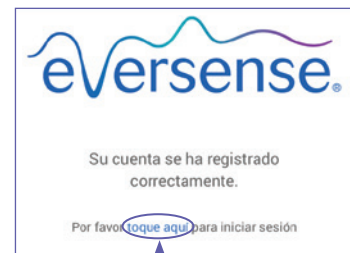

¡Felicidades! Su cuenta ya está activada. Puede hacer clic en el enlace para iniciar sesión y consultar los informes de datos de glucosa.

3 Para referencias futuras, registre la información de inicio de sesión de su cuenta de DMS a continuación

Correo electrónico: _____
 Contraseña: _____

4 Acceso a la cuenta de DMS desde un ordenador

Es necesario mantener la sesión abierta en la aplicación móvil en todo momento. Sin embargo, para acceder a todos sus datos, por favor visite: <https://global.eversensedms.com/> e introduzca su información de inicio de sesión.

Recuerde que su información de inicio de sesión es la misma que ha utilizado al crear su cuenta de Eversense.

* Para obtener una lista completa de dispositivos compatibles, visite <https://global.eversensed diabetes.com/compatibility/>



Resolución de problemas

No puedo iniciar sesión en el DMS Eversense, ¿por qué?

Parece que no ha activado su cuenta en el correo electrónico que se le envió en el plazo de 72 horas. Haga clic en el enlace del correo electrónico que recibió cuando creó su cuenta y será redirigido/a a la web donde podrá solicitar un nuevo enlace para activar su cuenta.



Consulte el número de su clínica en la parte superior derecha. Si no está indicado, contacte con su profesional sanitario para solicitarlo.


5 Permitir al profesional sanitario el acceso a sus datos

Vincular su proveedor a su cuenta de DMS Eversense

- Vaya a <https://global.eversensedms.com/> e indique su información de registro.
- Seleccione "Compartir datos" en el menú de la izquierda.
- Teclee el ID de la Clínica y pulse el botón "ENTRAR" en el teclado.
- Seleccione su proveedor de la lista desplegable "Proveedor" (Profesional sanitario).
- Haga clic en "Compartir mis datos". El estado se mostrará Pendiente hasta que su clínica acepte su invitación. Cuando su clínica acepte la invitación, "Pendiente" cambiará a "Aceptado", y el ✖ cambiará a ✔ en la columna Compartir datos. Su proveedor ahora podrá ver sus datos desde su cuenta de DMS Eversense Pro.



Puede ver, enviar por correo electrónico e imprimir informes

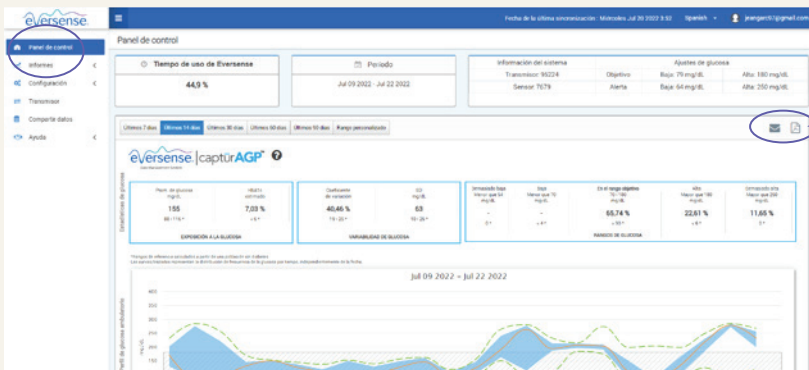

Puede imprimir o enviar los informes por correo electrónico. Haga clic en el icono de la impresora para ver e imprimir el informe o haga clic en el icono del sobre para enviarlo por correo electrónico.

Ubicados en el menú de configuración, los ajustes de **INFORME RESUMEN** le permiten establecer un informe con programación periódica que se le enviará por correo electrónico. Puede seleccionar la periodicidad del envío de los informes, así como qué informes desea recibir.

6 Comprensión de los informes de DMS Eversense

Descubra cómo sus datos pueden ayudarle a controlar la diabetes en www.eversenseddiabetes.com. Haga clic en **Formación del paciente**.

Para contactar con atención al cliente, llame al 900 100 117

† La aplicación emplea las medidas de seguridad adecuadas para garantizar que los datos personales se tratan de manera segura en cumplimiento de las leyes vigentes.