

# Nunca Fue Tan Fácil... Configuración Personalizada



La función **Configuración de sonido** de la aplicación Eversense® puede serle de ayuda para personalizar el sistema de MCG Eversense E3 de varias formas muy prácticas:

## ➔ 1. Configurar sonidos únicos de alerta

Puede elegir distintos sonidos para las alertas de nivel alto de glucosa y las de nivel bajo de glucosa.

**Toque:**

Menú > **Configuración** > **Configuración de sonido**

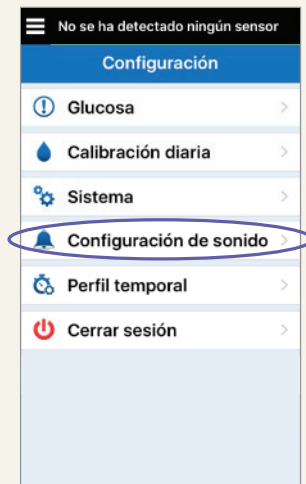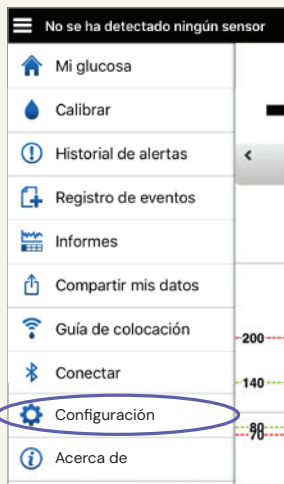


**Toque:**

para seleccionar el sonido de la alerta.



**Toque:**

< **Atrás** cuando termine y vuelva a la pantalla Configuración de sonido.

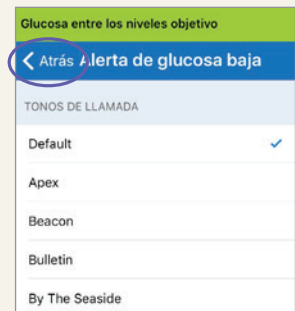

**Consejo:** Desplácese hacia abajo para escuchar las distintas melodías disponibles. Los tonos deben llamar la atención y ser distintos a otras notificaciones de sonido que tenga.

## ➔ 2. Configurar alertas de repetición

La configuración de **Aplazar repetición** y **Repetición de alta** determinará con qué frecuencia se repiten las alertas si el nivel de glucosa se mantiene por debajo del nivel de la alerta de nivel bajo o por encima de la alerta de nivel alto configuradas.

**Toque:**

Menú > **Configuración** > **Configuración de sonido**



**Toque:**

**Aplazar repetición** o **Repetición de alta** para seleccionar el intervalo de repetición de la alerta.

- Intervalo de selección de Aplazar repetición: de 5 a 30 minutos.
- Intervalo de selección de Repetición de alta: de 15 a 180 minutos

### Ejemplo de configuración de alertas de repetición

Susana se siente frustrada por la cantidad de alertas de nivel alto de glucosa que está recibiendo. Se da cuenta de que tiene la función de repetir la alerta de nivel alto de glucosa en 30 minutos. Sin embargo, Susana sabe que suele tardar más de una hora después de la corrección de insulina para que la glucosa alta disminuya. **Después de hablarlo con su profesional sanitario, cambia la configuración de repetir la alerta de nivel alto de glucosa a 90 minutos para darle tiempo a su organismo a responder a la insulina.**


**Importante:** Consulte siempre al profesional sanitario si no está seguro de la cantidad de tiempo que debe elegir para las alertas de repetición.



## → 3. Utilizar la función No molestar en la aplicación móvil Eversense®

Si activa la función No molestar en la Configuración de sonido, se apagan los sonidos de alerta y vibraciones sobre el cuerpo para las alertas que no sean críticas. Activar el modo No molestar en la aplicación Eversense es distinto a activarlo en su teléfono o dispositivo móvil. Vea la tabla a continuación para obtener más detalles.

**Nota:** La capacidad de recibir alertas es una ventaja clave de la MCG, así que le recomendamos que reflexione sobre cómo se utilizan las funciones de No molestar. Para ver una lista completa de las alertas críticas y no críticas, lea la sección Descripciones de las alertas y acciones en la Guía del usuario, donde las alertas críticas aparecen marcadas con un asterisco (\*).

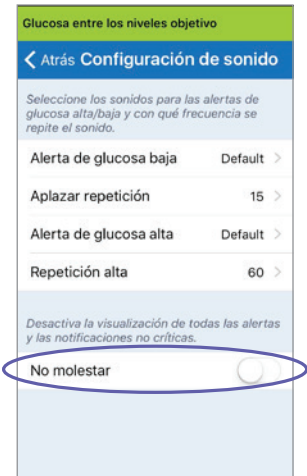

Función No molestar activada	Si está activada		
	Sentirá	Oirá	Verá
No molestar en aplicación Eversense	Vibraciones sobre el cuerpo <b>solo para las alertas críticas*</b>	Sonidos de alerta <b>solo para las alertas críticas*<sup>(1)</sup></b>	Mensajes emergentes de la aplicación <b>solo para las alertas críticas*</b>
No molestar en dispositivo móvil	Vibraciones sobre el cuerpo para <b>todas las alertas</b>	N/A	Mensajes emergentes de la aplicación para <b>todas las alertas<sup>(2)</sup></b>

1. Supone que el volumen del dispositivo no está silenciado, 2. Cuando la aplicación Eversense está en primer plano.

### Ejemplo de uso de No molestar

María quiere minimizar la cantidad de alertas que recibe, así que activa No molestar en su aplicación móvil Eversense®. Le gusta seguir recibiendo vibración sobre el cuerpo, alertas emergentes en la aplicación y sonidos de alerta para todas las alertas críticas, pero no para las alertas que no son críticas.