

Próximos Pasos con Eversense E3

A quién contactar:

- Si tiene alguna duda sobre el lugar de inserción, póngase en contacto con el profesional sanitario que realizó el procedimiento.
- Si tiene preguntas sobre el tratamiento de la diabetes, póngase en contacto con el profesional sanitario que le prescribió Eversense E3.
- Si tiene preguntas técnicas o necesita ayuda para comenzar a usar Eversense E3, póngase en contacto con el Servicio de Atención al cliente en el 900 100 117 (gratuito).

Cuidados de la incisión para una adecuada cicatrización

- **No nade ni sumerja la zona de la incisión en una bañera durante 5 días como mínimo. Puede darse una ducha, pero evite que el chorro de agua caiga directamente sobre la zona.**
- Tegaderm™ debe conservarse durante cinco días como mínimo. Si se desprende, sustitúyalo. Tenga mucho cuidado de no desprender las Steri-Strips™ al retirar la almohadilla Tegaderm™.
- Hasta que cicatrice la zona, evite actividades que puedan tirar de la incisión o provocar sudoración alrededor del lugar de inserción.
- Deje los Steri-Strips™ puestos hasta que se caigan.



Avisé a su profesional sanitario si:

- Los Steri-Strips™ se desprenden antes de que la incisión se cierre por completo.
- Presenta fiebre o tiene dolor, enrojecimiento, inflamación, sensación de calor o secreciones en el lugar de la incisión.

Revise minuciosamente la sección *Beneficios y riesgos* de la *Guía del usuario del sistema de MCG Eversense E3*.

Vídeos formativos disponibles en www.diabetes.ascensia.es.

1 Día uno: Comenzar

- Lea la *Guía del usuario de Eversense E3* y la *Guía de consulta rápida*.
- Descargue la aplicación Eversense y empareje el transmisor con el dispositivo móvil.
- Vincule el sensor y el transmisor inteligente, e inicie la fase de calentamiento de 24 horas.
- Introduzca los ajustes proporcionados por el equipo de tratamiento de la diabetes.
- Apague el transmisor, no es necesario que lo use hasta que comience la fase de inicialización.

2 Día dos: Comienza la fase de inicialización del sistema

- Coloque el transmisor sobre el parche adhesivo y ubíquelo sobre el sensor donde la señal es más potente.
- Realice 4 calibraciones de inicialización. Las calibraciones pueden realizarse cada 2 horas, pero debe hacer las 4 en un plazo de 36 horas.
- Tras la segunda calibración correcta, comenzará a ver los datos de glucosa.

3 Días tres y posteriores: Uso diario

- Comienza la fase de calibración diaria.
- Para compartir los datos de MCG con el profesional sanitario, vaya a www.diabetes.ascensia.es y siga los pasos en la *Guía del usuario de Eversense DMS*.