


200
 Silicone-Coated Lancets
 Lancetas recubiertas de silicona
 Lancetas revestidas a silicone

PULL DOWN TO OPEN. • TIRAR HACIA ABAJO PARA ABRIR. • PUXE PARA BAIXO PARA ABRIR.

EN Use with the Microlet® family of lancing devices.
 ES Usar con la familia de dispositivos de punción Microlet®.
 PT Utilizar com a família de dispositivos de punção Microlet®.

GLUCOSE ASSIST

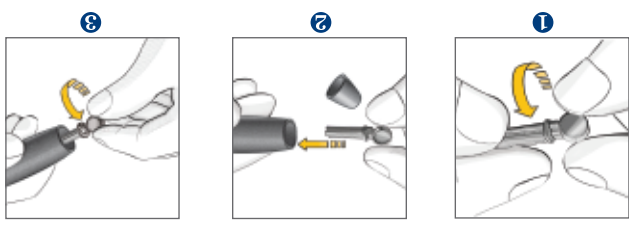

Refer to the instructions provided with your lancing device to perform fingertip testing and for additional safety and performance information. Consulte las instrucciones suministradas con su dispositivo de punción para realizar el análisis en la yema de los dedos y para obtener información adicional sobre seguridad y rendimiento. • Consulte as instruções fornecidas com o seu dispositivo de punção para realizar o teste na ponta do dedo e para obter informações de segurança e desempenho adicionais.

Instructions / Instrucciones / Instruções:

Intended Use: The Microlet® lancet is a single-use sterile device intended for drawing a capillary blood sample from an adult or child for glucose monitoring. The lancet is not intended for neonatal use. • **Uso previsto:** La lanceta Microlet® es un dispositivo estéril de un solo uso previsto para obtener una muestra de sangre capilar de un adulto o un niño para la monitorización de la glucosa. La lanceta no está indicada para uso neonatal. • **Utilização prevista:** A lanceta Microlet® é um dispositivo estéril de utilização única que se destina a colher amostras de sangue capilar em adultos e crianças, para monitorização da glicemia. A lanceta não se destina a ser utilizada em recém-nascidos.

WARNING: Keep out of reach of children. This package contains small parts that could cause suffocation if accidentally swallowed. • **ADVERTENCIA:** Manténgase fuera del alcance de los niños. Este paquete contiene piezas pequeñas que, si se tragan accidentalmente, pueden provocar asfixia. • **ATENÇÃO:** Manter fora do alcance das crianças. Esta embalagem contém peças pequenas que podem provocar asfixia, se ingeridas acidentalmente.

Imported and Distributed by:
 Ascensia Diabetes Care Ireland Ltd
 10 Earlsfort Terrace
 Dublin 2
 D02 T380
 Ireland
 Ascensia Diabetes Support
 1 800 920 111 – IE

UKRP (UK Responsible Person):
 Ascensia Diabetes Care UK Ltd
 Ascensia House
 Albert Road
 Newbury, Berkshire
 RG14 1DL UK
 Ascensia Diabetes Support
 0345 600 6030 – UK
 1 800 920 111 – IE

Importado e distribuído por:
 Ascensia Diabetes Care Spain, S.L.
 WTC Alameda Park Edificio 6
 4ª planta, Placa de la Pau, s/n
 08940, Cornellà de Llobregat
 Barcelona / España
 Tel.: 900 100 117
 atenciondiabetes@ascensia.com

Importado e distribuído por:
 Ascensia Diabetes Care Portugal, Lda.
 Av. D. João II, Edifício Atlantis, N.º 44C
 Piso 3, Parque das Nações
 1990-095 Lisboa
 PORTUGAL
 Tel: 808 269 269 (Dias úteis, 9h às 17h)

www.diabetes.ascensia.com
 Made in Poland. • Fabricado en Polonia. • Fabricado na Polónia.

Microlet®
 Coloured Lancets • Lancetas de colores • Lancetas coloridas

Simple, Smooth Testing
 Análisis fácil y sencillo
 Testagem simples e fácil

Microlet®
 Coloured Lancets • Lancetas de colores • Lancetas coloridas

REF 03856893
 STERILE R

Lancet remains sterile until protective cap is removed. Do not use if damaged or opened unintentionally. Dispose always as medical waste. La lanceta sigue estéril hasta que se retire la tapa protectora. No la utilice si está dañada o se ha abierto por accidente. Deséchela siempre como residuo médico. A lanceta permanece estéril até a tampa protetora ser removida. Não a utilize se estiver danificada ou tiver sido aberta acidentalmente. Elimine-a sempre como resíduos médicos.

If a serious incident has occurred during the use of this device or as a result of its use, please report it to the manufacturer and/or its authorized representative and to your national authority. Si se ha producido un accidente grave mientras se usaba este dispositivo o a consecuencia de haberlo utilizado, notifíquese al fabricante o a su representante autorizado y a las autoridades nacionales. Se tiver ocorrido um incidente grave durante a utilização deste dispositivo ou como consequência da sua utilização, informe o fabricante e/ou o respetivo representante autorizado e as autoridades nacionais.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
 Peter Merz-Strasse 99
 4052 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
 Via Marsilio, 102
 20156 Milano, Italy

ASCENSIA
 Diabetes Care

UKCA
 0086
 2797

90013579 6571 Rev. 11/24
 © 2024 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. • Todos los derechos reservados. • Todos os direitos reservados.

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, and Microlet are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, el logotipo de Ascensia Diabetes Care y Microlet son marcas comerciales y/o marcas registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, o logotipo Ascensia Diabetes Care e Microlet são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

5 016003 657108

RECYCLED PAPER

